

Leidapharm Zwangerschapstest

Betrouwbaar, simpel, snel

Productinformatie voor de gebruikster

Voordat u de test uitvoert is het belangrijk deze productinformatie goed te lezen.

De test is betrouwbaar indien de instructies goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Deze zwangerschapstest is eenvoudig met wat urine uit te voeren. U kunt binnen vijf minuten vaststellen of u zwanger bent of niet. Deze zwangerschapstest is even betrouwbaar als de zwangerschapstest die door de huisarts of laboratorium wordt uitgevoerd. De betrouwbaarheid is ongeveer 99%. De gevoeligheid is 10 mIU/ml.

Hoe werkt deze test?

Met de teststick kan de aanwezigheid van het zwangerschapshormoon hCG in de urine worden aangetoond. Dit hormoon komt alleen voor in uw urine als u zwanger bent. Uitzonderingsgevallen zijn het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Vanaf wanneer is deze test te gebruiken?

De zwangerschapstest kan al worden gebruikt vanaf de eerste dag van de verwachte menstruatie. U kunt de zwangerschapstest op elk moment van de dag doen. Echter heel vroeg in de zwangerschap (8-10 dagen na de bevruchting) is het hCG-niveau in de urine nog laag. U kunt dan het beste ochtendurine gebruiken. De test is voor eenmalig gebruik.

Uitslag van de test.

Voor een goede aflezing van het resultaat moet er altijd een roodkleurig bandje te zien zijn in het controlevenster. Indien dit niet het geval is dan is de test niet goed uitgevoerd. Zie ook de onderstaande tekening. Het wel of niet zwanger zijn kan worden afgelezen in het testvenster. Is in het midden van het testvenster een roodkleurig bandje aanwezig (hoe dun ook) dan bent u zwanger. Is alleen in het controlevenster een bandje aanwezig dan bent u niet zwanger.

Opmerkingen.

Wanneer de test aangeeft dat u zwanger bent dan raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts of verloskundige in uw woonplaats. Medische begeleiding tijdens de zwangerschap is belangrijk voor u en de baby.

Bewaarcondities.


1. Elk doosje bevat een productinformatie en een Leidapharm zwangerschapstest. De zwangerschapstest is verpakt in een ongeopende luchtdichte verpakking.
 2. Deze test is uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Niet innemen.
 3. De ongeopende luchtdichte verpakking dient minimaal bewaard te worden tussen de 4-30°C.
 4. De test niet gebruiken als de luchtdichte verpakking beschadigd of open is of als de daarop vermelde expiratiedatum is verstreken.
 5. Na het openen van de luchtdichte verpakking de zwangerschapstest direct gebruiken.
 6. Buiten bereik van kinderen bewaren.
 7. Na gebruik, kunnen alle onderdelen worden weggegooid.
-

Leidapharm Zwangerschapstest 1 stuks

IFU



Information For Users

Version: 2016-05

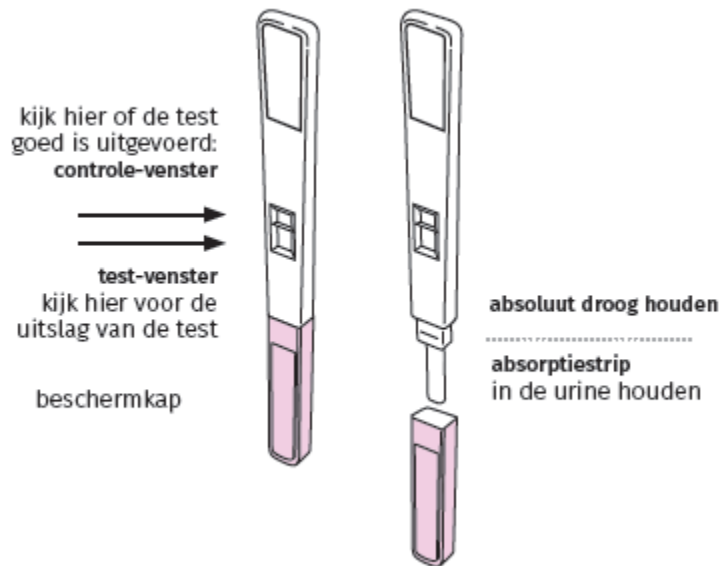

Instructies voor het gebruik

1. Neem de luchtdichte verpakking met daarin de teststick uit het doosje. Maak de luchtdichte verpakking open (figuur 1) en neem de teststick eruit. Gebruik de test direct na het openen van de luchtdichte verpakking.
2. Trek de kap van de teststick (figuur 2). Alleen het deel van de teststick dat door de kap bedekt was mag met de urine in aanraking komen. U kunt voor de verdere uitvoering van de test kiezen uit een van de twee onderstaande manieren (3a of 3b).
 - 3a. U houdt de teststick gedurende 5 tot 10 seconden in de straal van uw urine (figuur 3a).
 - 3b. U vangt wat van uw urine op in een bekertje en zet daar de teststick gedurende 5 tot 10 seconden in (figuur 3b).

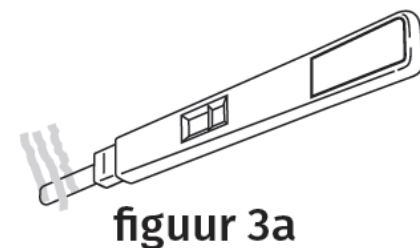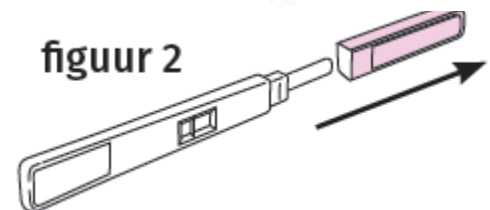

Leidapharm Zwangerschapstest 1 stuks


IFU

Information For Users

Version: 2016-05

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de aangegeven tijden voor het in de urine houden van de teststick. Het langer in de urine houden van de teststick kan het resultaat beïnvloeden. Er vormt zich dan geen enkele lijn.


4. Doe de kap weer op de teststick (figuur 4) en leg deze plat neer met de vensters naar boven.

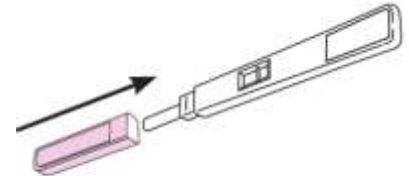

figuur 4


5. Wacht 5 minuten. In het controlevenster en soms ook in het testvenster ontstaat een roodkleurig bandje (figuur 5a en 5b).

6. Een roodkleurig bandje in het controlevenster geeft aan dat de test goed is uitgevoerd (figuur 5a).
Als er na 10 minuten nog geen roodkleurig bandje in dit venster ontstaat is de test niet goed verlopen.

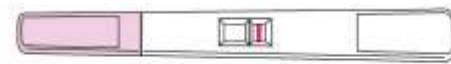

figuur 5a - niet zwanger

7. Als er behalve een roodkleurig bandje in het controlevenster, ook een roodkleurig bandje in het test venster ontstaat, bent u zwanger (figuur 5b).

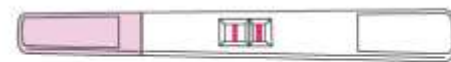

figuur 5b - zwanger

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Maakt het uit of ik veel (water) heb gedronken?

Als u veel water (bier, frisdrank, etc.) hebt gedronken, zal dat uw urine verdunnen, waardoor de hCG minder gemakkelijk wordt aangetoond. U kunt het beste normaal drinken.

Ik heb de absorptiestrook langer dan 10 seconden in de urine gehouden.

Dat geeft niets. Een paar seconden extra maakt geen verschil voor het resultaat.

Ik heb de absorptiestrook minder dan 5 seconden in de urine gehouden.

Er kan te weinig urine zijn opgenomen. Kijk naar de controlelijn in het kleine deelvenster. Verschijnt deze, dan is de test goed gegaan en is het resultaat betrouwbaar. Is er geen controlelijn verschenen, dan is het aan te bevelen om de test te herhalen met verse urine en een nieuwe zwangerschapstest.

Wat kan er aan de hand zijn als de resultaten niet lijken te kloppen?

Als u niet kunt vaststellen of er nu wel of geen duidelijke testlijn is verschenen, kan de hCG-spiegel nog heel laag zijn. Herhaal de test na 2 á 3 dagen met verse urine en een nieuwe test. Als u zwanger bent, zal deze lijn donkerder zijn dan bij uw eerste test. Bepaalde geneesmiddelen die hCG bevatten of die in combinatie met hCG worden gebruikt (zoals Pregnyl, Porfasi en Pergonal), of uitzonderlijke medische omstandigheden, kunnen een vals positief resultaat geven. Alcohol, pijnstillers, antibiotica, anticonceptiepillen ("de pil") en hormoonbehandelingen met clomifeencitraat (Chlomid, Serophen) hebben normaal gesproken geen effect op het testresultaat. Als u de afgelopen 8 weken bent bevallen, of als u in die

Leidapharm Zwangerschapstest 1 stuks

IFU

Information For Users

Version: 2016-05

periode een miskraam of abortus hebt gehad, kan de hCG-spiegel nog hoog zijn. In dat geval zal de test positief zijn.

Als ook bij herhaling van de test na enkele dagen de testuitslag nog negatief is en de menstruatie toch uitblijft, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts. Voor vragen over onze zwangerschapstest kunt u terecht bij uw apotheek. Of u kunt contact opnemen met 085-0160336.

Fabrikant:

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
ZAT du Londeau-Cerise BP 181
61006 Alencon Cedex
Frankrijk

In de handel gebracht door:

Leidapharm B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

Deze tekst is voor het laatst herzien in: mei 2016.

 0483 (min 5 mm hoog)

Index van symbolen

	Lees voor gebruik de productinformatie		Voor éénmalig gebruik		Fabrikant
	Voor in vitro diagnostisch gebruik		Niet gebruiken na		
	Bewaren bij 4-30°C		Lotnummer		

3061-11-10AZ
021652 1605